

 **HEALTH-PLUS CINTA KINESIO-ELASTICA**, está diseñada para el tratamiento de trastornos musculares (contracturas, desgarros, tirones, etc.), y a la vez combinado con Magne-ionoterapia para reducir la inflamación, mejorar la circulación sanguínea y linfática, y aliviar dolores de huesos y articulaciones, optimizando el proceso de recuperación del propio cuerpo. Se utiliza para tratar cualquier

problema asociado al dolor, desde dolores de cabeza a dolores de pies.
Características:
-Éste vendaje neuromuscular, está compuesto por materiales sin látex, por lo que puede ser utilizado con seguridad por aquellos con alergia al látex.
-Dicho tejido tiene mucha elasticidad, estirándose hasta el 30-40% de su longitud en reposo.
-La cinta es muy ligera y cómoda, por

lo que se puede llevar entre 4-6 días, incluso mojándola, (se aconseja no frotar la cinta y secar suavemente para evitar que se desprenda).
Modo de empleo:
-Aplicar sobre la piel limpia y seca.
-Limpiar la zona con alcohol antes de aplicar la cinta. En las zonas con mucho pelo es aconsejable quitarlo para que se adhiera correctamente.
-Redondear las esquinas de la cinta para

alargar su duración como se observa en la imagen.
-No ejercer excesiva tensión en la cinta durante su aplicación
-Al quitar la cinta hacerlo separando suavemente la piel hacia abajo, nunca se debe quitar de un tirón ya que podría irritar la piel.
-Se debe aplicar un ion y un hematite en el punto de máximo dolor, si el punto de dolor es muy amplio, colocar el

ion y la hematite a 8 cm. de distancia del siguiente grupo de 2 piedras hasta un máximo de 6 piedras en total.
CONTRAINDICACIONES:
-NO APLICAR SOBRE HERIDAS.
-NO USAR LAS PERSONAS CON MARCAPASOS O MECANISMOS ELECTRÓNICOS SUBCUTÁNEOS.
-EN CASO DE PICOR DEBE QUITARSE LA CINTA INMEDIATAMENTE CON JABÓN O

ACEITE DE BEBÉ DE FORMA SUAVE
MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y EN UN LUGAR PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DE ALTAS TEMPERATURAS Y DE HUMEDAD ELEVADA.

RECHACE IMITACIONES



TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

0034 900 505 652



E-mail: info@healthplus.es



Sello
Farmacia
Fecha:

